






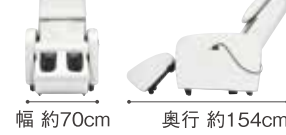
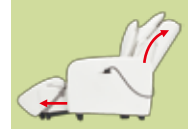


仕様一覧

マッサージチェア CHD-7400 SFIT (エスフィット)	 ○背もたれ・フットレスト/収納状態 落ち着いたあるファブリックの黒	 ○背もたれ・フットレスト/出た状態 落ち着いたあるファブリックの黒 (FK)・ファブリックブラック	 ○背もたれ・フットレスト/収納状態 光沢のあるシックな黒	 ○背もたれ・フットレスト/出た状態 光沢のあるシックな黒 (K)・ブラック	 ○背もたれ・フットレスト/収納状態 光沢のある明るい白	 ○背もたれ・フットレスト/出た状態 光沢のある明るい白 (W)・ホワイト
	標準価格(税別)	198,000円				
医療機器認証番号	225AKBZX00015000					
背すじマッサージ	自動コース	3種類(全身、肩、腰)				
	手動コース	23種類(脚マッサージ含む)				
	もみ玉肩位置調節	5段階				
	もみ玉幅調節	3段階				
脚マッサージ	もみ玉移動距離(最長時)	約56cm				
	脚もみ	●				
	足裏たたき	●				
背もたれ角度	約105°～約120°					
外形寸法	背もたれ・フットレスト収納状態  高さ 約75cm 幅 約70cm 奥行 約88cm		背もたれ・フットレスト出た状態  高さ 約95cm 幅 約70cm 奥行 約154cm			
	張地	ポリエステル		合成皮革		
定格入力	101W					
電気代	新電力料金目安単価22円/kWhで計算 約67円/月(1日1時間使用)					
JANコード	4975287604622	4975287604929	4975287604639			
質量	約44.5kg		約45.5kg			

●定格電圧/AC100V ●定格周波数/50/60Hz ●定格時間/20分 ●オートタイマー/約15分 ●電源コード長さ/約2m ●付属品/背クッション・座クッション
 ○一般的名称:家庭用電気マッサージ器 ○医療機器製造販売許可番号:27B2X00055 ○医療機器製造販売業:大東電機工業(株) 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

⚠ 医療機器の安全に関するご注意 ご使用の前に「取扱説明書」をお読みのうえ正しくお使いください

◎次の人は必ず医師に相談のうえ使用する
 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人

◎次の人は使用しない
 医師からマッサージを禁じられている人(血栓[塞栓]症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎、皮下組織の炎症を含む皮膚感染症など)
 [守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります]

◎使用中、体に異常を感じたときはただちに使用を中止し医師に相談する

◎次のようなときは使用しない
 ●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき
 [守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります]

◎使用前にマッサージ機構部の張地が破れていないかまた、その他の部分にも破れないか確認する ◎子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない

◎子供に遊ばせない ◎幼児の手の届く範囲では使用しない
 [事故やけが、故障のおそれがあります]

◎絶対に分解や修理、改造をしない
 [発火や異常動作をしてけがをするおそれがあります]

販売元
スライヴ株式会社
 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
 ホームページアドレス <http://www.daito-thrive.co.jp>

■商品のお買い物、取り扱い方法、修理などのお問い合わせは
 お客様相談センター 受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00

ナビダイヤル **0570-064-762** 電話・FAX番号はお間違えのないよう
 お確かのうえおかけください

◎ナビダイヤルがご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください
☎06-6783-8627 FAX.06-6783-8633

製造販売元
大東電機工業株式会社
 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号

お求めは当店で……

●本カタログの仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
 ●印刷物と実物とは色が若干異なることがあります。あらかじめご了承ください。
 ●このカタログの記載内容は2014年4月現在のものです。
 ◎本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み商品の引き取り費用などは含まれておりません。

THRIVE

マッサージチェア CHD-7400
SFIT (エスフィット)

Sofa style



これがローバックスタイルマッサージチェア

Massage style



上質なりビングソファから、全身爽快マッサージチェアへ。



Sofa style



Massage style

※マッサージするときは背クッションを後ろに回すかはずしてご使用ください
 ※背もたれの後ろに40cm以上、フットレストの前に60cm以上のすき間をあけて設置してください

コンパクトに置けるソファスタイルマッサージャーです。



コンパクトなソファスタイル
Sofa style


○もみ玉を背もたれ位置まで移動させれば、ソファスタイルでもマッサージできます。
 ※自動コースは腰コースのみ
 ※肩位置設定はできません



首から脚まで充実のマッサージスタイル
Massage style

首、肩・上・肩、背中、腰を多彩な手技・もみ技で施療。

疲れがたまりやすい肩や肩甲骨周り、骨盤周りなどの頑固な疲れやだるさを自動コースとお好みの自由選択コースが、しっかりと背すじにフィットしてマッサージ。

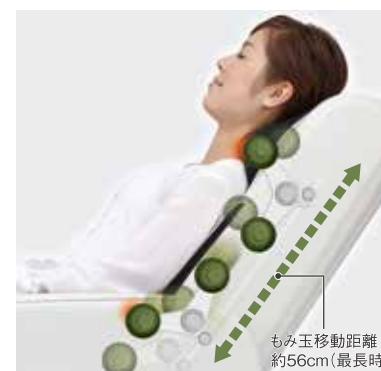

簡単操作で思い通りに使える。



自動コース
 全身 もみたたき動作を中心にしたマッサージで首から腰全体をほぐします。
 肩 もみ+もみたたき動作を中心にしたマッサージで肩を重点的にほぐします。
 腰 もみ+たたき動作を中心にしたマッサージで腰を重点的にほぐします。

手動コース/11種類*
 ① もみ ② もみ+背すじ全体 ③ もみ+背すじ部分
 ④ たたき ⑤ たたき+背すじ全体 ⑥ たたき+背すじ部分
 ⑦ もみたたき ⑧ もみたたき+背すじ全体 ⑨ もみたたき+背すじ部分
 ⑩ 背すじ全体 ⑪ 背すじ部分
 ※脚マッサージを組み合わせると23種類のマッサージをお選びいただけます。

脚全体をしっかりとマッサージ。

ふくらはぎ・足の甲は、もみ・しぼりあげ運動をくり返してマッサージ。足裏にある突起ローラーは、土踏まずを中心に溜まった疲れをほぐします。新機構の足首ローラーは、ローリングマッサージでむくみの解消を促します。

- ①もみボード ②もみボード(固定ボード) ③突起ローラー(回転式)
- ④固定突起 ⑤カルフローラー(回転式)



※写真、イラストはイメージです