


# スライヴ くつろぎ指定席 ZERO

## CHD-8600

### 取扱説明書 保証書付

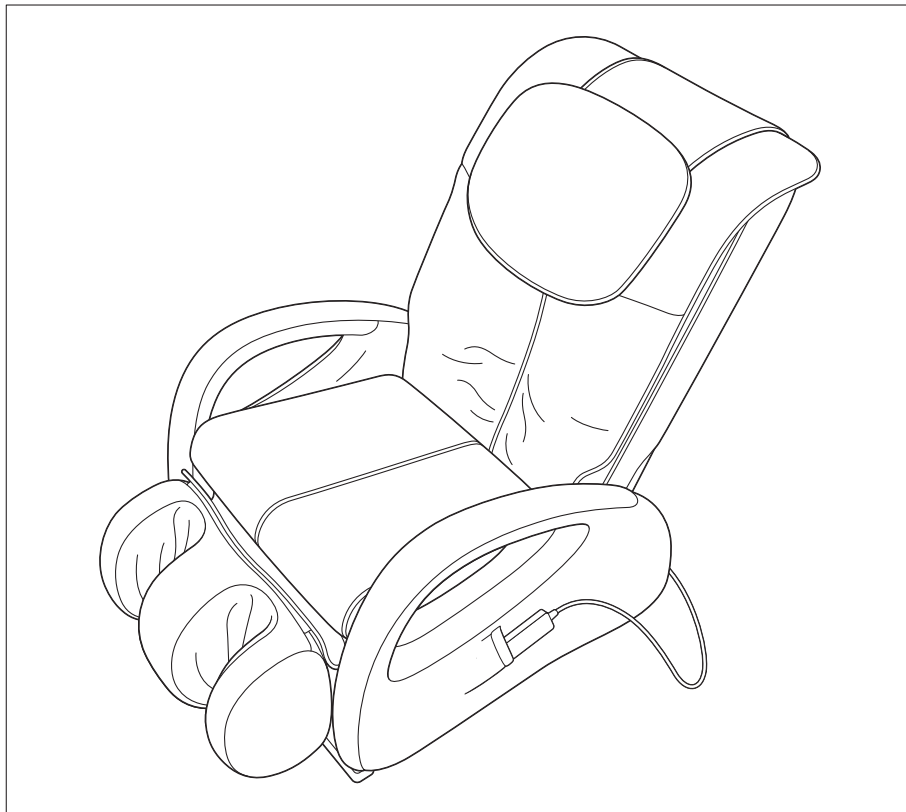



## もくじ

- 安全上のご注意……………1～3
- 各部の名称とはたらき……………4・5
- マッサージの前に……………6・7
- 使用方法……………8～10
- 使い終わったら……………11
- 使用上のご注意……………11
- お手入れについて……………11
- 保管について……………12
- 故障かなと思ったら……………12
- 愛情点検について……………13
- 仕様……………13
- アフターサービスについて…14・15
- メモ……………16・17
- 無料修理規定……………18
- 保証書……………裏表紙



このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


 <b>警告</b>	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 <b>注意</b>	人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容



絵表示の例

	⊘記号は、「禁止」の行為を示しています。 (左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制したり指示したりするものです。 (左図の場合は電源プラグを抜く)



- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。





## 警告

 <p>強制</p>	<p>医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ペースメーカー等の電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電子機器を使用している人</li> <li>●悪性腫瘍のある人</li> <li>●妊娠中や出産直後の人</li> <li>●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人</li> <li>●皮膚に創傷のある人</li> <li>●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど)</li> <li>●心臓に障害のある人</li> <li>●安静を必要とする人</li> </ul> <p>守らないと事故や体調不良をおこすおそれがあります。</p>
	<p>骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人</p> <p>●背骨に異常がある人、曲がっている人</p> <p>●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人</p> <p>●本機を使用しても効果がみられない人</p> <p>●その他医療機関で治療中の人</p>
	<p>使用前には、必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。</p> <p>また、その他の部分にも破れがないか確認する。 (どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。)</p> <p>守らないとけがや感電のおそれがあります。</p>
	<p>リクライニングやフットレストの出し・入れをするときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。</p> <p>またフットレストの下に指や手、身体を入れない。</p> <p>守らないと事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>交流100Vで使用する。</p> <p>守らないと火災や感電の原因になります。</p>
<p>次の人は使用しない。</p> <p>医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)症状を悪化させるおそれがあります。</p>	

 禁止	<p>子供だけで使わせたり、自分で操作できない人に使わせない。            子供に本機で遊ばせない。また、幼児の手の届く範囲では使用しない。            事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>フットレストの出し入れ、またはリクライニングさせるときはひじ掛けと床の間に手や脚、身体を入れない。            事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>座面以外の場所に座らない。            転倒による事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>背クッションを外して使用しない。            事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。            電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」に修理を依頼する。            そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。</p>
	<p>電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。            また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。            感電や火災の原因になります。</p>
 分解禁止	<p>絶対に分解や修理、改造をしない。            発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。</p>


## 注意

 強制	<p>1回の使用時間は15分以内に。また、一箇所への連続使用は3分以内にする。            守らないと逆効果やけがのおそれがあります。</p>
	<p>もみ玉の位置を確認した上で、ゆっくり座る。身体をまっすぐにして、首および背骨が左右のもみ玉の間にくるようにする。            守らないと事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>首の周辺をマッサージする時は、もみ玉の動きに注意し、過度に強いマッサージをしない。            守らないと逆効果やけがのおそれがあります。</p>
	<p>使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。            守らないと事故や体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>水平な場所で使用する。            守らないと本体が倒れて事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>畳やフローリングなど傷つきやすい床の上で使用する場合は、マットなどを敷く。            守らないと床が傷つくおそれがあります。</p>
	<p>移動する時は背もたれを起こし、フットレストを収納した状態で、前後の鉄フレームを下から持ち上げて移動する。その際 背もたれやフットレストは持たない。            守らないと転倒による事故やけが、また床が傷つくおそれがあります。</p>
	<p>使用後は電源スイッチを「OFF」、施錠スイッチを「閉」にする。            守らないと子供のいたずらによる事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないよう、必ず電源プラグを持って引き抜く。            守らないと感電やショートのおそれがあります。</p>
 禁止	<p>次のようなときは使用しない。            ● 疲労が激しいとき。 ● 酒に酔っているとき。 ● 湿疹が生じているとき。            体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>食前、食後の1時間は使用しない。            体調不良を起こすおそれがあります。</p>

 禁止	<p>素肌では使用しない。 けがのおそれがあります。</p>
	<p>頭、ひじ、ひざ、腹部には使用しない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>機構部や背もたれ、座クッションとフットレストの間に手や脚を入れない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>もみ玉、もみボードへ無理な力をかけたり、長時間の連続使用はしない。 安全装置が働き動作が止まることがあります。</p>
	<p>他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良を起こすおそれがあります。</p>
	<p>使用中は眠らない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>背もたれを持って移動しない。 背もたれが外れて事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>リクライニングした状態で座ったり降りたりしない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>人または物を乗せたまま移動しない。 転倒による事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペット等の暖房器具の上で使用しない。 火災のおそれがあります。</p>
	<p>頭部に髪飾りなどの固いものをつけて使用しない。 機構部に接触してけがのおそれがあります。</p>
	<p>故障が見つかったらすぐに使用を止め、電源スイッチを切る。 守らないと事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを切らない。 けがのおそれがあります。</p>
	<p>お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯は使用しない。 変色・変形の原因になります。</p>
<p>アース線はガス管、電話線、避雷針、水道管（途中がプラスチック）等に接続しない。 感電や火災・事故の原因になります。</p>	
 水場使用禁止	<p>浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。</p>
 アース線をつける	<p>アースを確実に取り付ける。 守らないと故障や漏電のときに感電のおそれがあります。</p>
 電源プラグを抜く	<p>使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 守らないとホコリや湿気で絶縁劣化による、漏電火災の原因になります。</p>
	<p>お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手でプラグにふれない。 守らないと感電ややけどのおそれがあります。</p>
	<p>停電のときは電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 守らないと停電復帰時に事故やけがのおそれがあります。</p>

# 各部の名称とはたらき


## 本 体

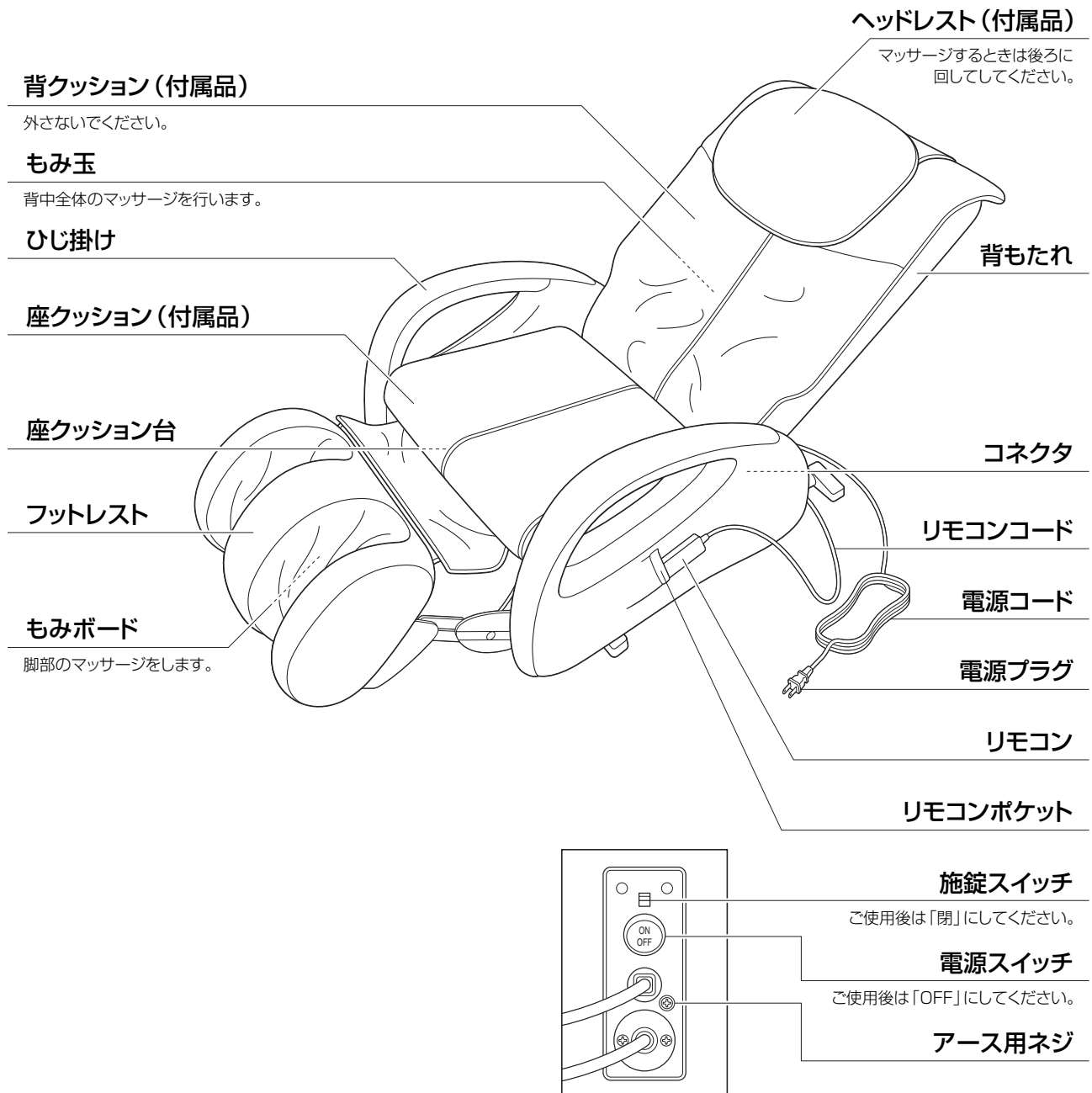

●付属品は必ず本機に同梱されているものをお使いください。


# 各部の名称とはたらき

## リモコン

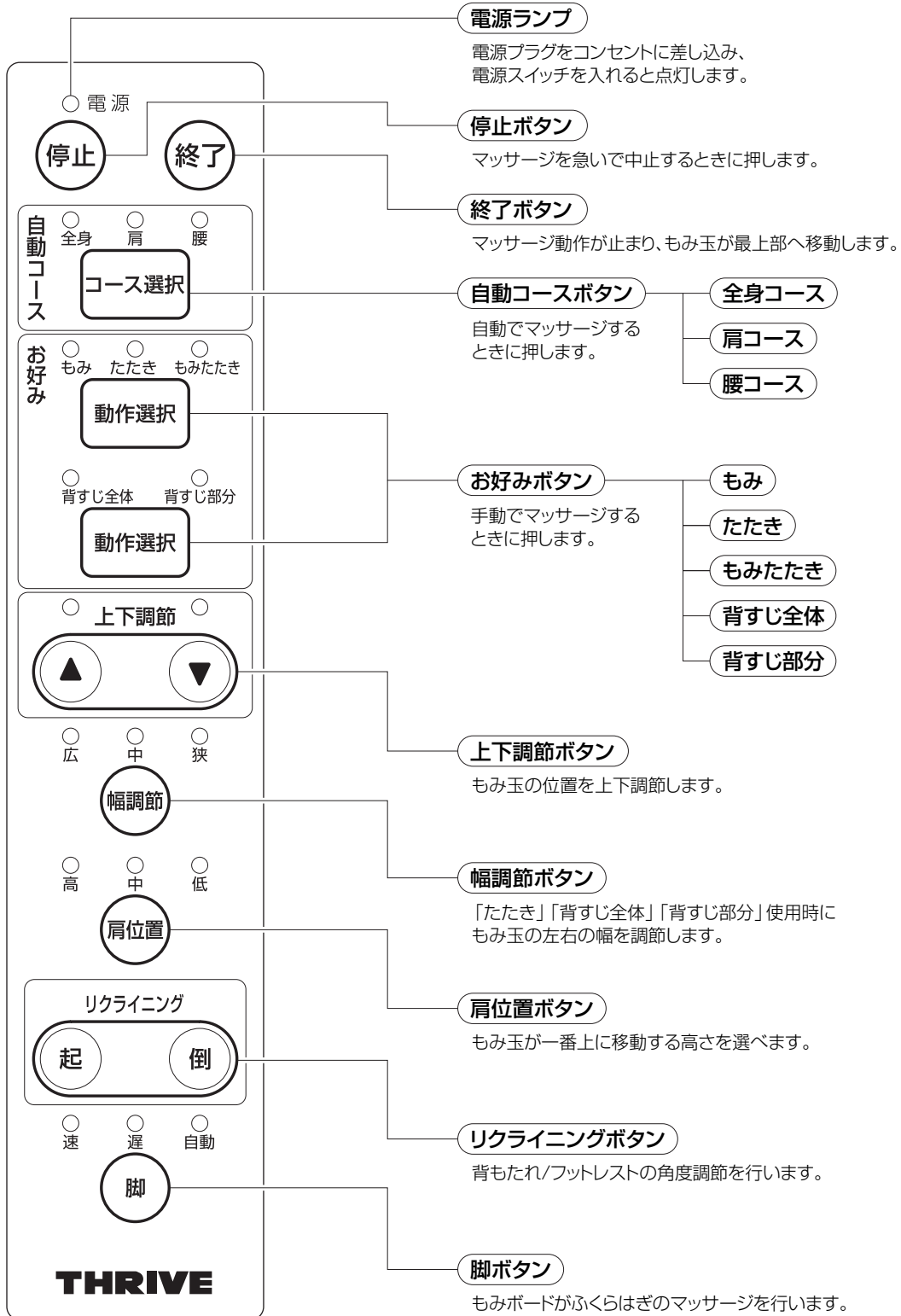


# マッサージの前に


## 組み立て方

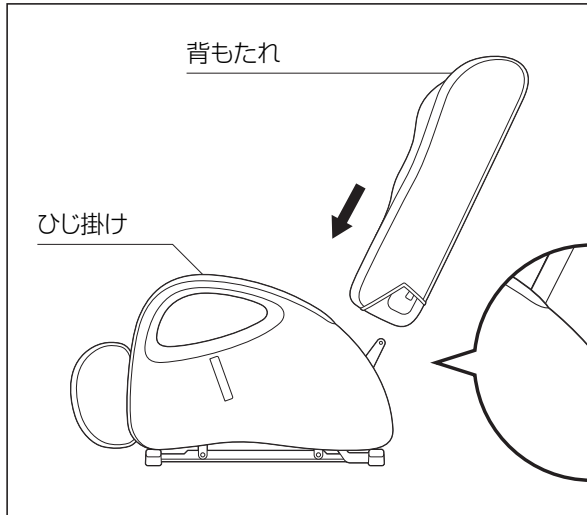


1. ひじ掛けの金具を背もたれの金具の中に「カチッ」音がするまで差し込んでください。

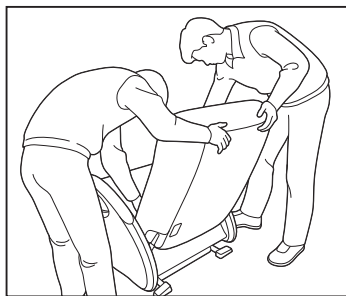

● 重量物ですので取付は必ず2人で設置してください。

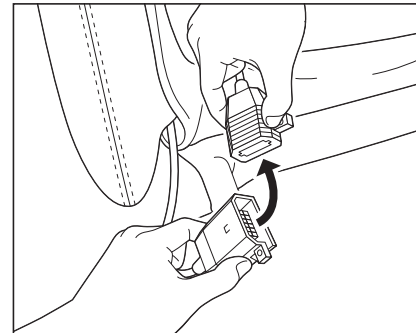

2. 背もたれ側と座面・フットレスト側のコネクタを接続してください。

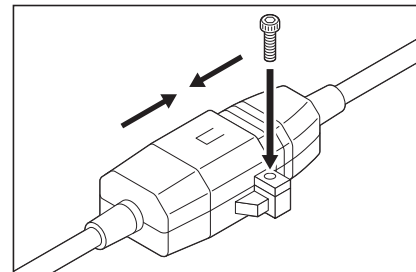


六角穴付ボルト（付属品）を六角レンチ（付属品）でねじ止めし、コネクタを固定してください。


● 六角レンチ（3mm）は捨てずに保管してください。

### ご参考

● まちがって片側の金具だけが差し込まれた場合。

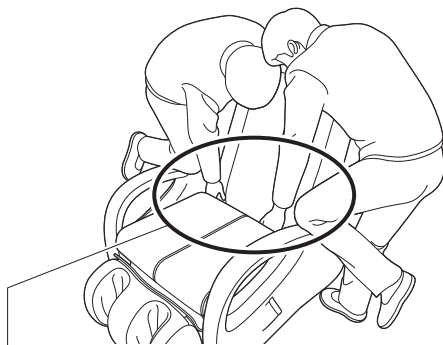


● 本体ひじ掛けを脚で押さえ、背もたれの両側・金具部分にあるボタンを押しながらゆっくりと背もたれ全体を持ち上げて取り出す。ボタンを押さないと背もたれを持ち上げると、取り付け部が破損するおそれがあります。

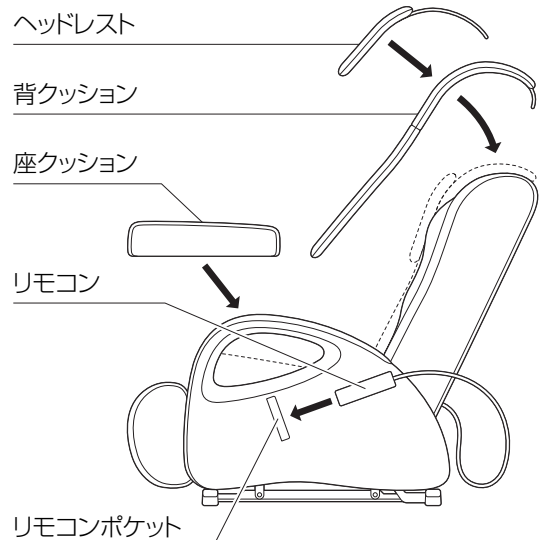

3. 背クッション・ヘッドレストを背もたれにセットし、座クッションを座クッション台、リモコンをリモコンポケットにセットしてください。

## 設置のしかた

1. 背もたれの後ろに10cm以上、フットレストの前に80cm以上のすき間をあけて水平な場所に設置してください。
2. ホットカーペット等の暖房器具の上には置かないでください。
3. 重量物ですので必ず2人で運んでください。
  - 移動する時は、前後の鉄フレームを下から持ち上げて移動してください。床を傷つけるおそれがあります。

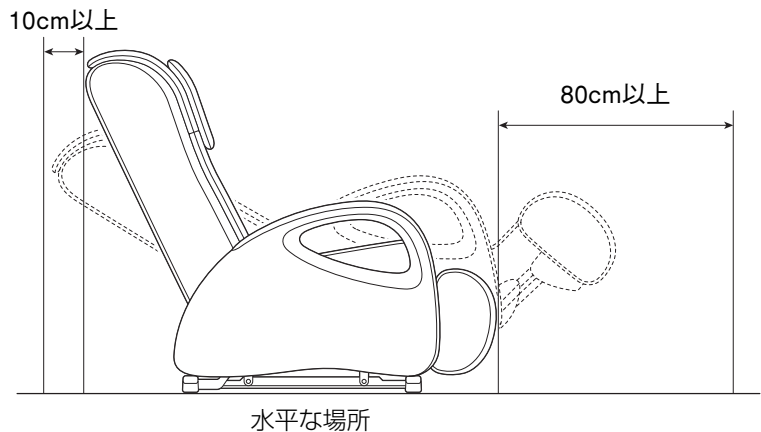

## アースについて


- アース線を本体のアース端子(ネジ)と電源コンセントのアース端子に取り付けてください。

### 電源コンセントにアース端子がない場合

- お買い上げの販売店、電気工事店に相談しアース工事(D種〈第三種〉接地工事)をしてください。(アース工事費は本製品の価格には含まれておりません)

### 取り付けてはいけないところ

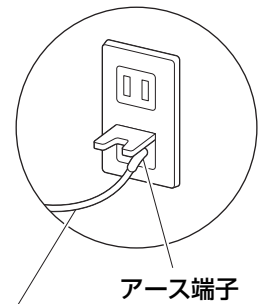

- ガス管……………爆発や引火のおそれがあります。
- 電話線や避雷針…落雷の時、感電や発火のおそれがあります。
- 水道管……………途中からプラスチックの場合はアースになりません。



アース線  
(銅線(直径1.6mm)  
お買い上げの販売店で  
お求めください。)

## ご使用前の確認

- 電源コードは確実に接続されているか確認してください。
- スイッチが正しく動作するか確認してください。

 <b>警告</b>	使用前には、必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。 また、その他の部分にも破れがないか確認する。 (どんなに小さな破れでも直ちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。) 守らないとけがや感電のおそれがあります。
 <b>注意</b>	背クッションを外して使用しないでください。



# 使用方法

## 電源の入れ方

1. 電源プラグを差し込む前に、電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. 施錠スイッチを「開」にしてください。
4. 電源スイッチを「ON」にしてください。リモコンの電源ランプが点灯します。


## 肩位置の設定

動作ボタンを押す前に、もみ玉の肩位置設定をしてください。

**肩位置** ボタンを押して、肩位置を5段階から選んでください。

背の高い人は上に、背の低い人は下に設定してください。

また、特に背の低い人はクッション等で高さを調節してください。

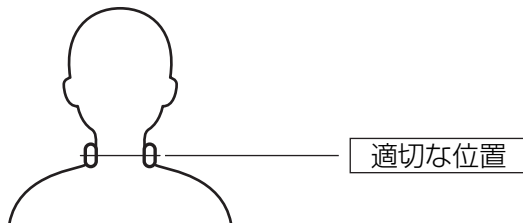


- もみ玉が適切な位置に当たらないときは、身体をずらして調節してください。

ご使用ごとに肩位置の設定が必要です。

肩位置	段階	点灯ランプ		
		高	中	低
上 ↑ ↓ 下	1	●		
	2	●	●	
	3		●	
	4		●	●
	5			●

肩位置5段階と点灯ランプの関係

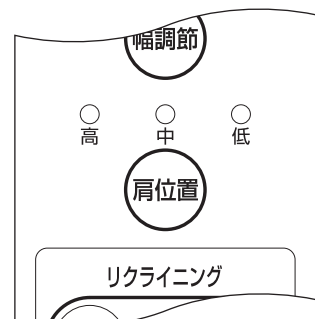

# 全身マッサージ


## 自動コース

1. 背すじと脚をあらかじめ設定された動作で効果的にマッサージします。  
自動コース **全身** は、もみたたき動作を中心にしたマッサージが全身をほぐします。  
自動コース **肩** は、もみ動作ともみたたき動作を中心にしたマッサージが肩を重点的にほぐします。  
自動コース **腰** は、もみ動作とたたき動作を中心にしたマッサージが腰を重点的にほぐします。

2. マッサージをやめたいときに **終了** を押すと、  
マッサージ動作が止まり、もみ玉が最上部に移動します。

マッサージを急いで中止したいときに **停止** を押すと、全ての動作が止まります。

- 刺激が強過ぎるときはタオルなどをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。

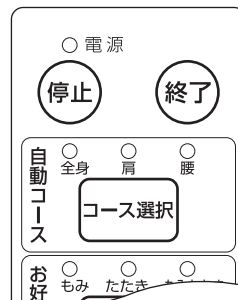

# 背すじマッサージ

## 自由選択コース

1. 単独動作は、

もみ	たたき	もみ	背すじ	背すじ
		たたき	全体	部分

  
複合動作は、

もみ	+	背すじ	もみ	+	背すじ
		全体			部分
たたき	+	背すじ	たたき	+	背すじ
		全体			部分
もみ	+	背すじ	もみ	+	背すじ
たたき		全体	たたき		部分

どちらかの動作を停止させて単独動作に切り替えることができます。


2. 単独および複合の **背すじ全体** 以外の動作をお選びの場合は  
上下調節 **▲ ▼** を押してもみ玉の高さを調節してください。  
上下調節 **▲** を押している間、もみ玉が移動します。  
上限まで上がると止まります。  
上下調節 **▼** を押している間、もみ玉が移動します。  
下限まで下がると止まります。

3. **たたき 背すじ全体 背すじ部分** 使用時に **幅調節** ボタンを押してください。  
ボタンを押すごとにもみ玉の左右の幅が [中-狭-広] の順番に切り替わります。

4. マッサージをやめたいときに **終了** を押すと  
マッサージ動作が止まり、もみ玉が最上部に移動します。

マッサージを急いで中止したいときに **停止** を押すと、全ての動作が止まります。

- 刺激が強過ぎるときはタオルなどをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。

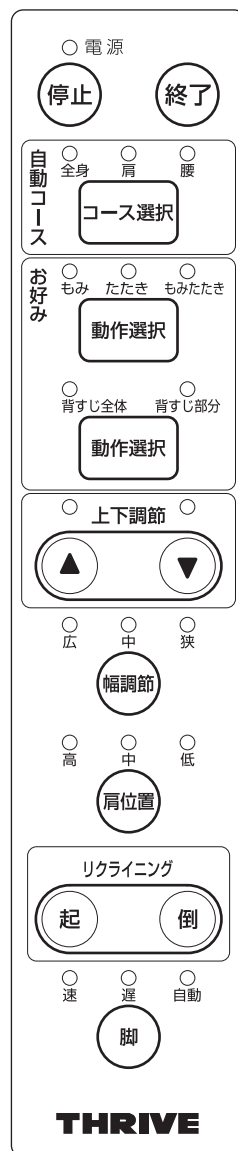

## マッサージの種類と調節

動作	上下調節	幅調節
もみ	○	—
たたき	○	○
もみたたき	○	—
背すじ全体	—	○
背すじ部分	○	○
もみ + 背すじ全体	—	—
もみ + 背すじ部分	○	—
たたき + 背すじ全体	—	○
たたき + 背すじ部分	○	○
もみたたき + 背すじ全体	—	—
もみたたき + 背すじ部分	○	—

### オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約15分で自動的に止まります。

### 脚マッサージ

ボタンを押すごとに、[速→遅→自動→止]の順番に切り替わります。  
[自動]はもみ運動、しぼりあげ運動、静止状態をくり返してマッサージします。

- もみボードが適切な位置に当たらないときは、背もたれを倒したり体をずらして調節してください。
- 刺激が弱いときはタオルなどをあてがい、もみボードの感触を調節してください。



## 使い終わったら

1. (終了) を押してマッサージ動作を止めてください。
2. リクライニングしている場合はリクライニング (起) ボタンを押してチェア状態に戻してください。
3. 電源スイッチを「OFF」施錠スイッチを「閉」にしてください。
4. 電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 使用上のご注意

- 整髪料・化粧品などを接触させないでください。  
化学変化による生地の変色や劣化の原因になります。
- 直射日光を毎日長時間当てないでください。  
生地の変色や劣化の原因になります。
- ビニールや室内の壁紙等に長時間接触させないでください。  
生地が変色する原因になります。

## お手入れについて

乾いた布で汚れをふき取ってください。  
シンナー、ベンジン、熱湯は使用しないでください。  
変色、変形の原因になります。

## 保管について


- 1.電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 2.アース線を取りはずしてください。
- 3.汚れやホコリを取った後、カバーをかけて湿気の少ない処に保管してください。

## 故障かなと思ったら

機器に故障が発見された場合は使用をただちに中止し、電源を切り、お買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」に点検、修理を依頼してください。

症 状	調べるところ
<ul style="list-style-type: none"><li>●もみ玉と布がすれる音</li><li>●張地とその他がすれる音</li><li>●マッサージ動作時のモーター音</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●構造上のもので機能等に影響はありません</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●もみ玉、もみボードが止まる</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●無理な力がかかっていませんか 下記「安全装置について」を参照</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●動作しない</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグが抜けていませんか</li><li>●オートタイマーが働き停止状態になっていませんか</li></ul>

症 状	直し方
<ul style="list-style-type: none"><li>●動作せずリモコンからピッ、ピッの連続音がする</li><li>●動作せずリモコンのランプが点滅する</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグを差し直してください (外来雑音による、誤動作が考えられます)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>●連続使用後にマッサージが止まる (リモコンランプは点灯している)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください</li></ul>

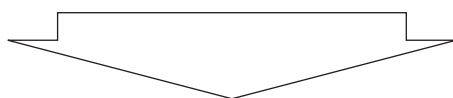



上記点検後なお異常音、動作しないなどの異常を感じたらただちに使用を中止してください。電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」に点検、修理を依頼してください。

### 安全装置について

もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き動作が止まることがあります。そのときは一度電源を切り、少し置いてから再度電源スイッチを入れてください。特に体重100kg以上の方は身体を浮かせ気味にしてお使いください。

# 愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に作動することを確認してください。

 <p>愛情点検</p>	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● こげくさいにおいがする。</li> <li>● 電源コード、プラグが異常に熱い。</li> <li>● コードを動かすと通電したり、しなかったりする。</li> <li>● その他異常がある。</li> </ul>		<p>故障や事故防止のため電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」に点検・修理をご相談ください。</p>
---	---	---	--

# 仕 様

販売名	スライヴ くつろぎ指定席ZERO CHD-8600
医療機器認証番号	223AGBZX00044000
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
定格入力	75W
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
肩位置調節	5段階
もみ速さ	約38回/分
たたき速さ	約450回/分
背すじ全体速さ	約62秒
背すじ全体移動距離	最長:約59cm
背すじ部分移動距離	約9cm
脚もみマッサージ	約20回/分
背もたれ角度	約115°~約145°
外形寸法	フットレスト収納 幅 約70cm×奥行 約120cm×高さ 約100cm フットレストを出した状態 幅 約70cm×奥行 約165cm×高さ 約80cm
質量	約47kg
電源コード長さ	約2m
張地	合成皮革
付属品	背クッション・ヘッドレスト・座クッション・六角穴付ボルト・六角レンチ(3mm)
医療機器製造販売業	大東電機工業株式会社 〒579-8046 大阪府東大阪市昭和町9番11号
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

# アフターサービスについて

- 保証書（裏表紙）  
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間  
当社は補修用性能部品を製造打ち切り後最低6年間保有しております。（ただし、縫製部品は除きます。）  
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- マッサージ機構部（背もたれ）の修理の場合  
お客様で背もたれを取り外していただく必要があります。

## 背もたれを取り外し方



### 注意

背もたれを取り外す前に必ず背もたれを起こし、フットレストを収納した状態に戻してください。守らないと本体が倒れて事故やけがのおそれがあります。

1. 背もたれ後部のコネクタの六角穴付ボルトを付属の六角レンチで取り外し（図1）、コネクタの接続を解除してください。（図2）
  2. 背もたれの両側・金具部分にあるボタンを押しながらゆっくりと背もたれ全体を持ち上げて取り外してください。（図3）
- 重量物ですので取り外し作業は必ず2人で行ってください。
  - その他ご不明な場合  
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店または「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。

図1

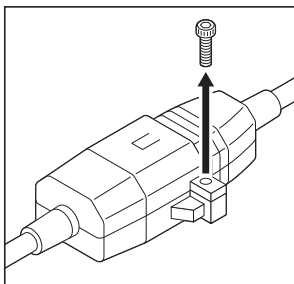


図2

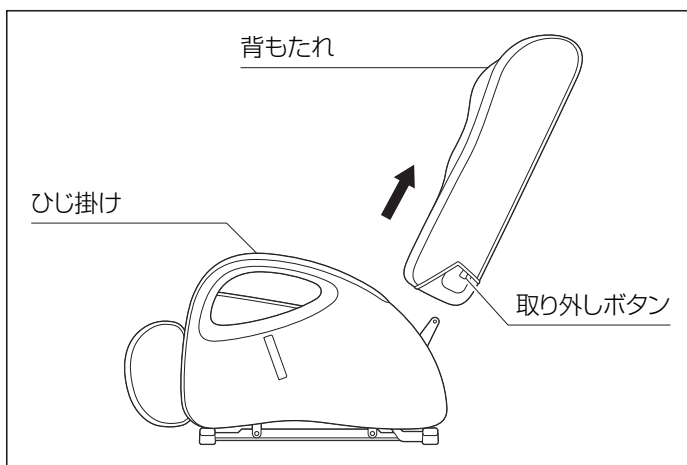
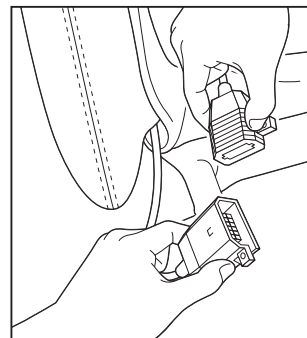


図3

地球の環境保護のため、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしただってください。

## お客様ご相談センターについて

修理・お手入れ・お取扱いなどのご相談は、まずお買い上げ販売店へお申し付けください。

商品のお取扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル



**0120-064-762**

※お客様がご加入されている電話（NTT以外の一般回線、PHS及びIP電話等）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問合せください。

**バリカンの修理及び刃砥ぎ・商品に関するお問合せ**

**TEL 06-6783-8627 FAX 06-6783-8633**

スライヴ株式会社  
〒577-0026 東大阪市新家東町 2-38

**マッサージチェアの修理に関するお問合せ**

**TEL 0867-22-3482 FAX 0867-22-5055**

**マッサージチェア以外の修理に関するお問合せ**

**TEL 0867-22-5110 FAX 0867-22-3874**

岡山大東電機工業株式会社  
〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

**【受付時間（祝日を除く月～金）9:00～17:00】**  
都合によりお休みさせていただくことがあります。

### お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。







## 〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買上げ販売店又は、P15のお客様ご相談センターが無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご用意の上、お買上げの販売店又は、P15のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P15のお客様ご相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (ロ) お買上げ後の取付場所の移動、落下等による故障及び損傷
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷
  - (ホ) 本書の提示がない場合
  - (ヘ) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
  - (ト) 指定外電源（電圧・周波数）使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は、P15のお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP14をご覧ください。

# 保証書

引取修理

出張修理

スライヴ くつろぎ指定席ZERO  
CHD-8600

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様

フリガナ

お名前

様

ご住所 〒

電話

販売店

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用して頂く場合がございますので、ご了承ください。

（P18の無料修理規定をご覧ください。）

販売元

**スライヴ 株式会社**

〒577-0026 東大阪市新家東町2-38

お客様ご相談センター TEL.06-6783-8627

製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒579-8046 東大阪市昭和町9-11