

# THRIVE



肩、背すじ、腰から脚まで、全身をマッサージ。  
マッサージチェア&オットマンの2wayタイプ。  
場所をとらず、空間に溶け込むコンパクトデザイン。

くつろぎ指定席 Light  
マッサージチェア CHD-3820



(WH)ホワイト



(BK)ブラック



**THRIVE**  
スライヴ

## 自動コースは3種類、手動コースは11種類から選べます。

### 自動マッサージ

あらかじめ設定された3種類の動作で効果的にマッサージします。

- 全身** 全身をマッサージ。
- 肩** 肩を重点的にマッサージ。
- 腰** 腰を重点的にマッサージ。

### 手動マッサージ

手動マッサージ(もみ、ゆらぎ、背すじ)の単独、複合動作が選べます。

#### ●単独動作(ひとつの動作)

- もみ
- ゆらぎ
- 背すじ

#### ●複合動作(ふたつの動作の組み合わせ)

- もみ + 背すじ
- ゆらぎ + 背すじ

- 幅調節: 背すじ使用時に、もみ玉の左右の幅を無段階に調節できます。
- 上下調節: もみ、ゆらぎ使用時に、もみ玉の位置を上下調節できます。
- オートタイマー: 動作開始から約15分で自動的に止まります。



### 脚マッサージ

モミボードとローラーが、ふくらはぎ・足・足裏をマッサージします。



フットレストを上げた状態でふくらはぎのマッサージ



フットレストを上げた状態で足・足裏のマッサージ

### フットレストの回転

フットレストは、脚マッサージ状態からオットマン状態にすることができます。



フットレストを回転させてオットマンとして使用



(WH) ホワイト



(BK) ブラック



## くつろぎ指定席 Light マッサージチェア CHD-3820

### 仕様

- 販売名: マッサージチェアCHD-3820 ●医療機器認証番号: 303AKBZX00048000
- 一般的な名称: 家庭用電気マッサージ器 ●定格電圧: AC100V ●定格周波数: 50/60Hz ●定格入力: 71W ●定格時間: 20分 ●オートタイマー: 約15分 ●もみ回数(背面): 約27回/分 ●ゆらぎ回数(背面): 約27回/分 ●背すじ速さ(往復): 約78秒 ●背すじ移動距離(最長): 約51cm ●脚もみマッサージ: 約13回/分 ●ローラー自転回数: 約13回/分 ●電源コード長さ: 約2m ●張地: 合成皮革 ●付属品: ヘッドレスト ●JANコード: (WH) ホワイト: 4975287608903 (BK) ブラック: 4975287608910 ●質量: 約24.7kg ●医療機器製造販売業許可番号: 27B2X00055 ●医療機器製造販売業: 大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号
- メーカー希望小売価格 99,800円(税抜価格90,727円)

### 外形寸法



幅 約62cm 奥行 約80.5cm 高さ 約94cm



奥行 約132.5cm 高さ 約76.5cm

### 電動リクライニング

- 背もたれ角度: 約110°~約139°



- 開梱時本体  
43.5cm  
62cm 75cm
- 梱包時1台箱  
幅 約76cm×奥行 約64.5cm×高さ 約52.5cm

背もたれを外れた状態で梱包されていますので、スムーズな搬入が可能です。○設置場所までの搬入経路をご確認ください。

使用目的または効果: あんま・マッサージの代用 | 疲労回復・血行をよくする・筋肉の疲れをとる・筋肉のこりをほぐす・神経痛・筋肉痛の痛みの緩解 | 一般家庭で使用すること

電気代目安(月): 57円(1日1時間使用) 電力料金目安単価27円/kWhで計算

**安全上のご注意** ご使用前に取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●けんしゅう(腱鞘)炎の人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●その他医療機関で治療中の人 ●事故や体調不良の原因になります。使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。その他の部分にも破れがないか確認する(どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)。○けがや感電の原因になります。次の人は使用しない。医師からマッサージを禁じられている人。(例: 血栓(塞栓)症、重度の動脈のうづ(瘤)、急性静脈のうづ(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ●症状を悪化させる原因になります。次のようなときは使用しない。●疲労が激しいとき ●酒に酔っているとき ●湿疹が生じているとき ●体調不良をおこす原因になります。乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。●事故やけがの原因になります。機器が故障した場合は、勝手に修理せず、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに連絡してください。

お求めは当店どうぞ……

製造販売元

**大東電機工業株式会社**

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2番38号

お問い合わせは お客様ご相談センター

受付 9:00~17:00(祝日を除く、月~金)

ナビダイヤル

**0570-064-762**

一般電話からは市内通話料金をご利用いただけます。

オフィシャルサイト



大東電機工業

daito-thrive.co.jp

QRからモバイルサイトへどうぞ



表示を正しく  
家電公取協会員

当社は、適正な表示を  
推進しています。

- 製品の仕様は改良などにより予告なく変更することがあります。
- 製品の価格には、配送・設置・電気工事・使用済み製品の引き取り費用などは含まれておりません。