

保管用

THRIVE

保証書付

月弥

KAGUYA

マッサージチェア CT-100

取扱説明書



このたびはお買い上げいただき、ありがとうございました。
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに保管してください。

使用目的または効果

あんま、マッサージの代用

- 疲労回復
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす
- 神経痛、筋肉痛の緩解



一般家庭で使用すること

もくじ



- 安全上のご注意……………1～3
- 各部の名称とはたらき……………4・5
- マッサージの前に……………6・7
- 使用方法……………8～13
- 使い終わったら……………13
- 使用上のご注意……………14
- お手入れについて……………14
- 保管について……………14
- 故障かなと思ったら……………15
- 愛情点検について……………15
- 仕様……………16
- アフターサービスについて…16・17
- 無料修理規定……………18
- 保証書……………裏表紙

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」、「注意」に区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
 注意	人が損害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容


絵表示の例

	○記号は、「禁止」の行為を示しています。(左図の場合は分解禁止)
	●記号は、行為を強制・指示するものです。(左図の場合は電源プラグを抜く)


- お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。






警告

 禁止	次の人は使用しない。 医師からマッサージを禁じられている人。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈りゅう(瘤)、急性静脈りゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)症状を悪化させる原因になります。
	乳幼児や自分で意思表示できない人に使わせない。 事故やけがの原因になります。
	安全に責任を負う人の監督または指示がない限り、子供や補助を必要とする人に使わせない。 事故やけがの原因になります。
	子供には本体の上に乗せたり遊ばせたりしない。 事故やけがの原因になります。
	強く押しつけて使用しない。 皮膚や筋肉を痛める原因になります。
	本体の上にとったり、座面以外の場所に座らない。 転倒による事故やけが、故障の原因になります。
	ヒーターで布カバーが熱くなるため、温度や傷みの感覚が弱い人や自らの意志で治療部を動かさない人は使用しない。 低温やけどの原因になります。
	電源コードや電源プラグが破損したり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。電源コードや電源プラグが破損した場合は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに修理を依頼する。そのまま使い続けると感電やショート、火災の原因になります。
	電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったり、本体に巻きつけたりしない。 また、重いものをのせたり、熱器具に近づけて使用しない。 感電や火災の原因になります。
	 分解禁止

 強制	医師の治療を受けているときや次の人は必ず医師に相談のうえ使用する。 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している人 ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠中や出産直後の人 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 ●皮膚に創傷のある人 ●安静を必要とする人 ●体温38℃以上の有熱期にある人(倦怠感、悪寒、血圧変動など急性炎症症状の強い時期や衰弱しているときなど) ●骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[疼痛性]疾患の人 ●背骨に異常がある人、曲がっている人 ●かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人 ●温度感覚喪失が認められる人 ●低温やけどをしたことがある人 ●けんしょう(腱鞘)炎の人 ●本品を使用しても効果がみられない人 ●その他医療機関で治療中の人
	事故や体調不良をおこす原因になります。
	使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。 また、その他の部分にも破れがないか確認する。 どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。 けがや感電の原因になります。
	背もたれ、フットレストを動作するときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。 またフットレストのすき間に足や手、身体を入れない。 事故やけがの原因になります。
	交流100Vで使用する。 火災や感電の原因になります。
電源プラグを定期的に掃除する。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり漏電火災の原因になります。	

注意

 禁止	食前、食後の1時間は使用しない。 体調不良をおこす原因になります。
	肌の弱い人は素肌で使用しない。 事故やけがの原因になります。
	マッサージ以外の目的に使用しない。また、頭、胸、腹、骨部へは使用しない。 事故やけがの原因になります。
	フットレスト、背もたれのすき間に足や手、身体を入れない。 事故やけがの原因になります。
	もみ玉へ無理な力をかけたり、長時間の連続使用はしない。 安全装置が動き動作が止まることがあります。
	他の治療器具と同時に使用しない。 体調不良をおこす原因になります。
	使用中は眠らない。 事故やけがの原因になります。
	背もたれ、フットレストを持って移動しない。 事故やけがの原因になります。
	フットレストが上がった状態で椅子の乗り降りをしていない。 転倒による事故やけが、故障の原因になります。
	座らない状態でフットレストに負荷をかけない。 転倒による事故やけがの原因になります。
	人または物をのせたまま移動しない。 転倒による事故やけがの原因になります。
	ストーブなど火気の近くで使用したり、たばこを吸いながら使用しない。 また、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない。 火災の原因になります。
	治療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。 機構部に接触してけがの原因になります。
	ポケットの中にもものを入れて使用しない。 エアバッグに接触して事故やけが、ものの破損の原因になります。

 禁止	使用中に電源プラグを抜いたり、電源スイッチを切らない。 故障の原因になります。
	お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。 変色・変形の原因になります。
	アース線はガス管、電話線、避雷針、水道管(途中がプラスチック)などに接続しない。 感電や火災・事故の原因になります。
	水などをこぼしたり、ぬれた身体で使用しない。 感電やショート、故障の原因になります。
 水場使用禁止	浴室など湿度の高い場所では使用しない。 感電や故障の原因になります。
	1回の使用時間は15分以内にする。また、一箇所への連続使用は3分以内にする。 1日の使用時間は30分以内にする。 長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。
 強制	はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用する。 強い刺激に慣れていないと逆効果やけがの原因になります。
	もみ玉の位置を確認したうえで、ゆっくり座る。 身体をまっすぐにして、首および背骨が左右のもみ玉の間にくるようにする。 事故やけがの原因になります。
	首の周辺をマッサージするときは、もみ玉の動きに注意し、過度に強いマッサージをしない。 逆効果やけがの原因になります。
	エアーチューブプラグ内やエアーチューブプラグ受け、コネクタ内やコネクタ受けにホコリなどを入れない。 異音発生などの故障の原因になります。
	座らない状態でエアーマッサージを動作させない。 エアーバッグの耐久性が低下する原因になります。
	使用中、身体に異常を感じたときはただちに使用を中止し、医師に相談する。 事故や体調不良をおこす原因になります。
	水平な場所で使用する。 本体が倒れて事故やけがの原因になります。
	畳やフローリングなど傷つきやすい床の上で使用する場合は、マットなどを敷く。 床が傷つく原因になります。
	使用後は電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜く。 子供のいたずらによる事故やけがの原因になります。
	使用後は電源コードのねじれをほどいて保管する。 断線やショートの原因になります。
	電源プラグを抜くときは、接続部に無理な力をかけないよう、必ず電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートの原因になります。
	故障が見つかったら、すぐに使用を止め、電源プラグをコンセントから抜く。 事故やけがの原因になります。
	次のようなときは使用しない。 ● 疲労が激しいとき ● 酒に酔っているとき ● 湿疹が生じているとき 体調不良をおこす原因になります。
	 アース線をつける
使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く。 ホコリの付着・湿気などで絶縁不良になり、漏電火災の原因になります。	
 電源プラグを抜く	お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手でプラグにふれない。 感電ややけどの原因になります。
	停電のときはただちに電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグを抜く。 停電復帰時に事故やけがの原因になります。

各部の名称とはたらき

本 体

肩エアーバッグ

肩のマッサージを行います。

もみ玉(背面)

背中全体のマッサージを行います。

腕エアーバッグ

腕のマッサージを行います。

腰エアーバッグ

腰のマッサージを行います。

座クッション(付属品)

もみ玉(座面)

フットレスト

もみボード

脚部のマッサージを行います。

ヒーター

足裏の布カバーを温めます。

足裏ローラー

ローラーでマッサージを行います。

ヘッドレスト固定ベルト

ストッパー

背もたれを起こしたときに固定します。

ヘッドレスト(付属品)

背もたれ

ひじ掛けパネル (付属品)

リモコンコードフック

リモコンコード



リモコン

リモコンポケット

電源コード

電源プラグ

座クッション台

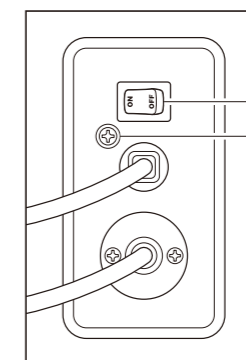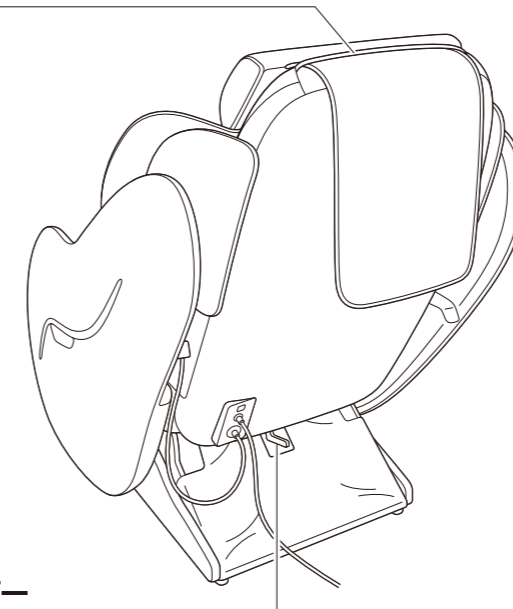

電源スイッチ


ご使用後は「OFF」にしてください。

アース端子(ネジ)

●付属品は必ず同梱されているものをお使いください。

各部の名称とはたらき


リモコン

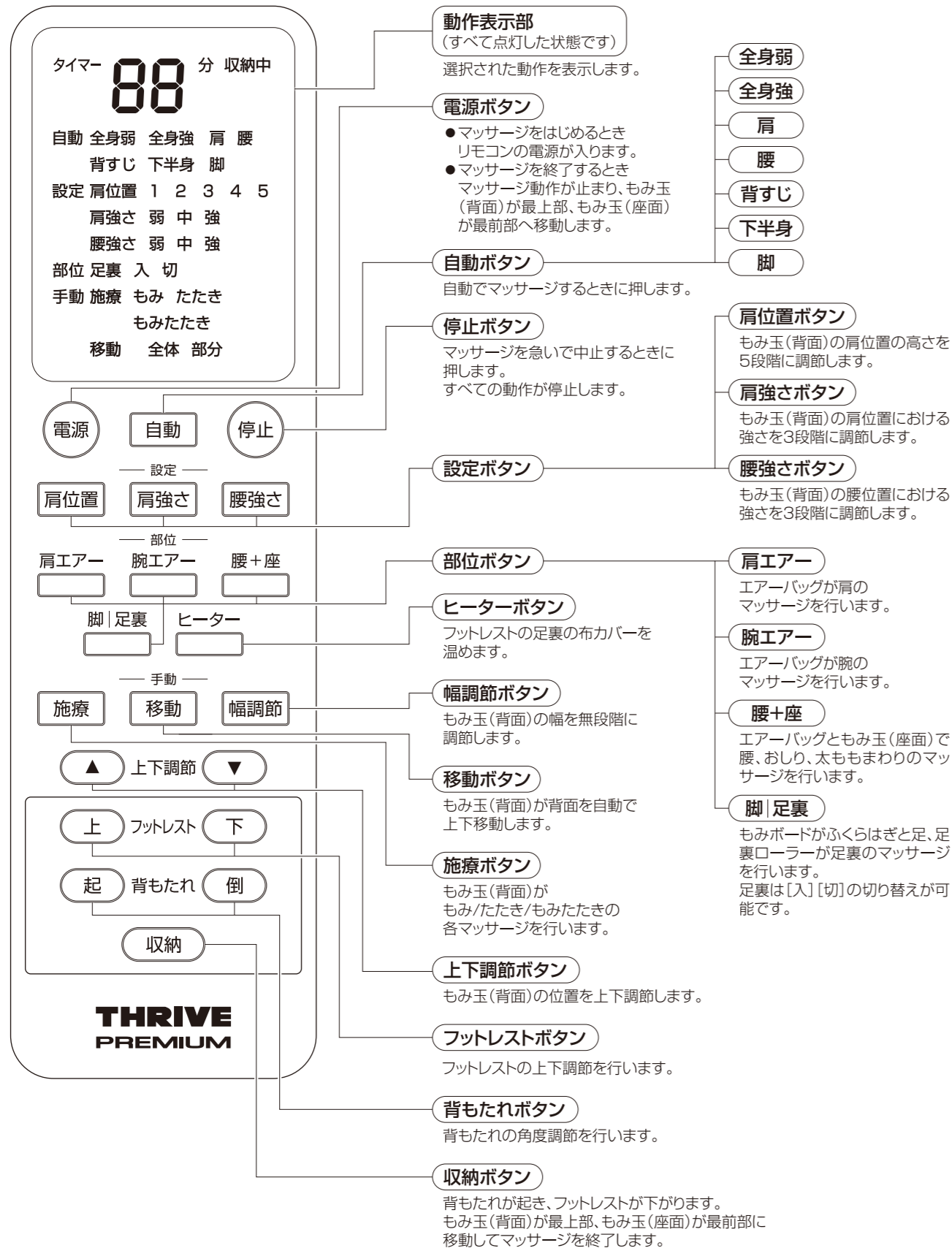

マッサージの前に


組み立て方

1. ストッパーが「カチッ」と音がするまで背もたれを矢印の方向に起こしてください。このとき、電源コード、リモコン、リモコンコードを挟まないようにしてください。

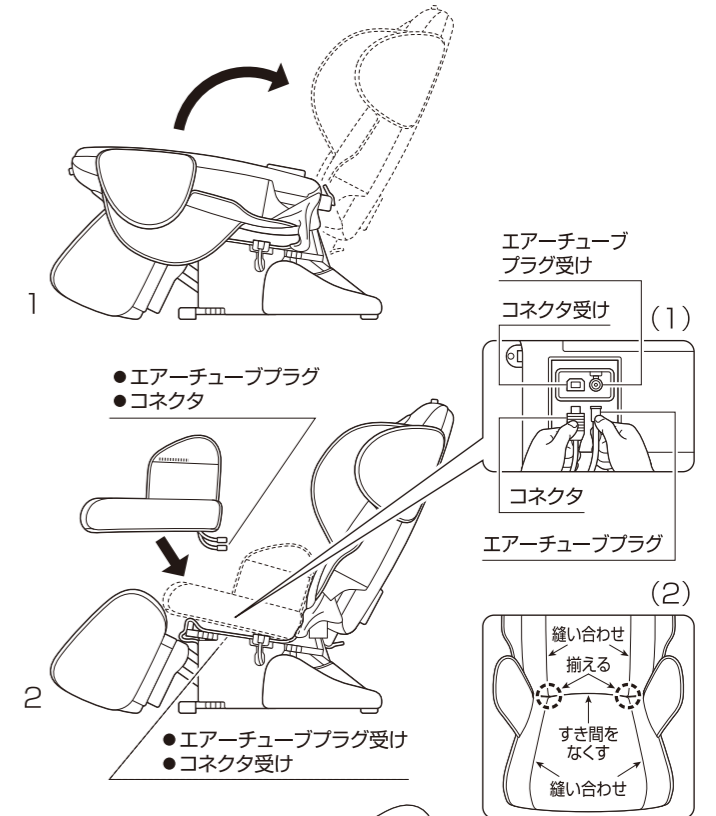

2. エアチューブプラグ・コネクタの接続と、座クッションをセットしてください。
(1) 座クッション裏面にあるコネクタ・エアチューブプラグを座クッション台にあるコネクタ受け・エアチューブプラグ受けに確実に差し込んでください。
(2) 背もたれの2本の縫い合わせと座クッションの2本の縫い合わせを揃えながら、背もたれと座クッションの間にすき間ができないようにセットしてください。


3. ひじ掛けパネルを本体にセットしてください。
(1) はじめに、ひじ掛けパネルのバネ付き突起①を突起受け①に合わせ、次に突起②(2箇所)をロック付きの突起受け②(2箇所)に合わせます。最後にひじ掛けパネルを真下に下ろし、「カチッ」と音がするまで差し込んでください。
(2) ひじ掛けパネル内側にあるファスナーと、座クッション横の腰エアバッグにあるファスナーを閉めてください。

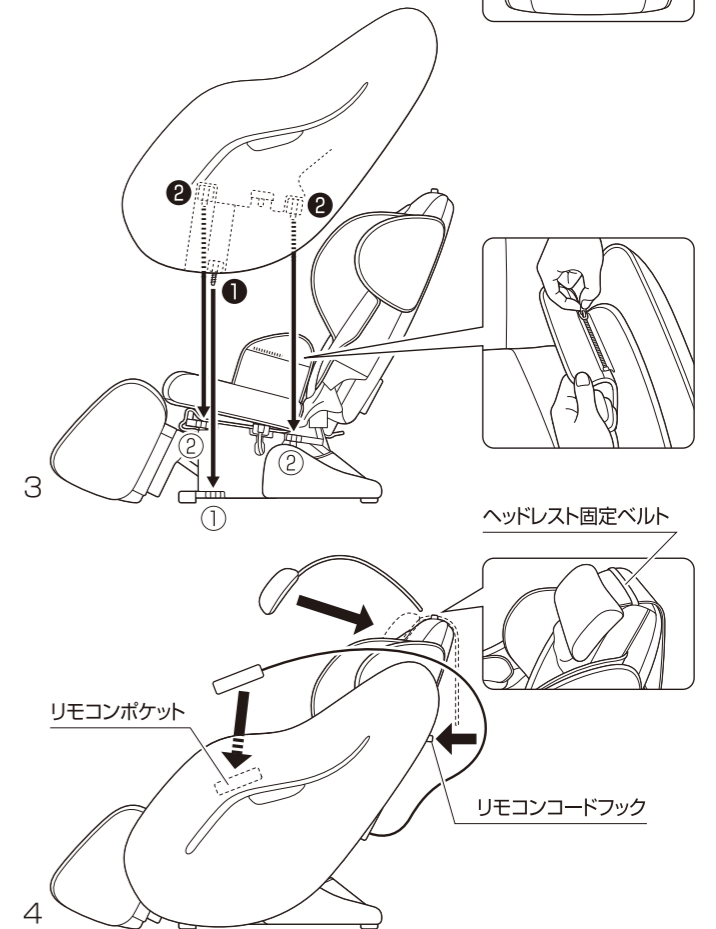

4. ヘッドレストを背もたれのヘッドレスト固定ベルトに通してセットしてください。リモコンをひじ掛け内側のリモコンポケットにセットし、リモコンコードをリモコンコードフック(面ファスナー)で留めてください。

設置のしかた

- 背もたれを倒した状態で背もたれの後ろに30cm以上、フットレストを上げた状態でフットレストの前に30cm以上のすき間をあけて水平な場所に設置してください。
- ホットカーペットなどの暖房器具の上に設置しないでください。
- 直射日光が長時間あたるところに設置しないでください。合成皮革が変色や変質する原因になります。
- 畳やフローリングなど傷つきやすい床の上で使用する場合は、本体の下にマットなどを敷いてください。
- 重量物ですので必ず2人以上で運んでください。
- 移動するときは、ひじ掛けパネルの下を持ち(背もたれやフットレストは持たないで)移動してください。

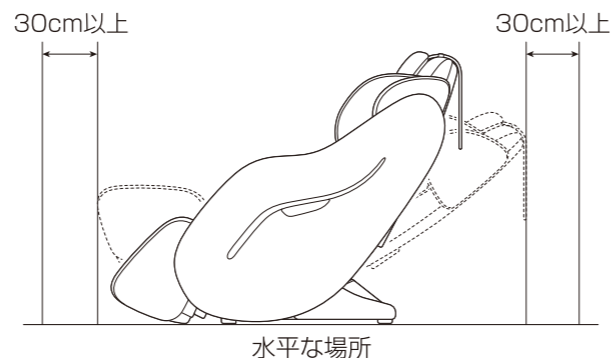

アースについて


- アース線を本体のアース端子(ネジ)と電源コンセントのアース端子に取り付けてください。

電源コンセントにアース端子がない場合

- お買い上げの販売店、電気工事店に相談しアース工事(D種<第三種>接地工事)をしてください。(アース工事費は本製品の価格には含まれておりません)

取り付けてはいけないところ

- ガス管……………爆発や引火の原因になります。
- 電話線や避雷針…落雷のとき、感電や発火の原因になります。
- 水道管……………途中からプラスチックの場合はアースになりません。

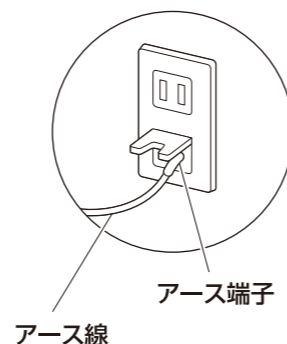

ご使用前の確認

使用前に必ず張地が破れていないか確認し、破れがあるときはただちに使用を中止してください。

- 張地を外した状態や破れた状態で使用しないでください。破れた場合は使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
- 施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しないでください。事故やけが、故障の原因になります。
- 頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。事故やけがの原因になります。
- 電源プラグが確実に接続されているか確認してください。
- リモコンが正しく動作するか確認してください。
- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。



警告

子供には本体の上に乗せたり遊ばせたりしない。
使用前に必ずマッサージ機構部の張地が破れていないか確認する。
また、その他の部分にも破れがないか確認する。
どんなに小さな破れでもただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください。
けがや感電の原因になります。




注意

1回の使用時間は15分以内にする。
また、一箇所への連続使用は3分以内にする。
1日の使用時間は30分以内にする。
長時間の連続使用は必要以上の刺激となり、逆効果やけがの原因になります。

使用方法



電源の入れ方

1. 電源プラグを差し込む前に、背もたれ背面下の電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
 2. 電源プラグをコンセントに差し込んでください。
 3. 電源スイッチを「ON」にしてください。
リモコンの動作表示部の[収納中]ランプが点滅し、もみ玉(背面)が最上部、もみ玉(座面)が最前部に移動しタイマー表示ランプ等が点灯します。
- 節電のため、マッサージ終了後、リモコン操作を行わず約4分間経過すると、リモコンの動作表示部が自動で消灯します。
再び使用する場合は(電源)ボタンを押してください。

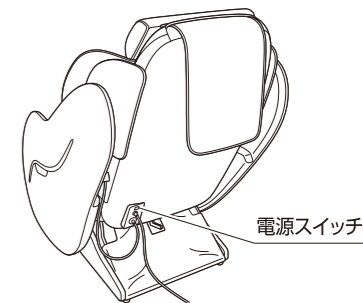

フットレストの上下調節と背もたれの角度調節

- リモコンのフットレスト(上)(下)ボタン押すと、フットレストが上下します。
背もたれ(起)(倒)ボタンを押すと、背もたれが起倒します。
背もたれの角度は床面に対して約114°から145°の間で調節できます。
- フットレスト
- 上ボタン……………フットレストが上がります。
 - 下ボタン……………フットレストが下がります。
- 背もたれ
- 倒ボタン……………背もたれが倒れます。
 - 起ボタン……………背もたれが起き上がります。

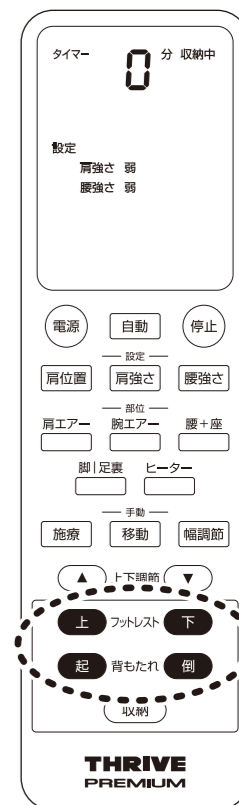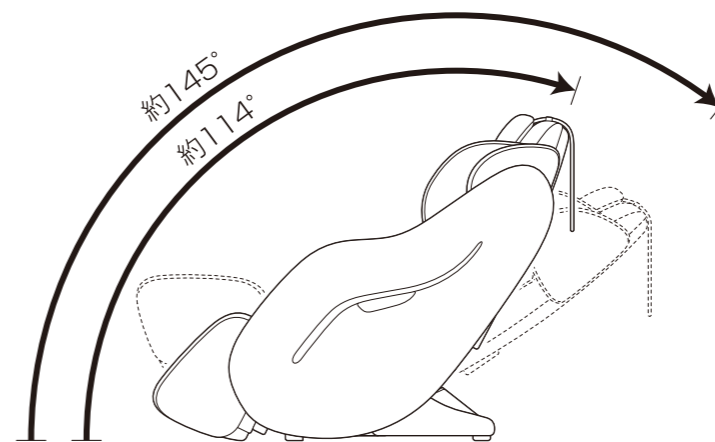


警告

フットレスト、背もたれを動作させるときは、必ず周囲に人やペットがいないことを確認する。
またフットレスト、背もたれのすき間に足や手、身体を入れない。
事故やけがの原因になります。

フットレストの延伸について

背の高い人や脚の長い人が使用する際にフットレストを最長で約14cm伸ばすことができます。
フットレストに足を入れた状態で前に押し出してください。

- フットレストを上げずに伸ばすときは、床を傷つけないようゆっくり伸ばしてください。

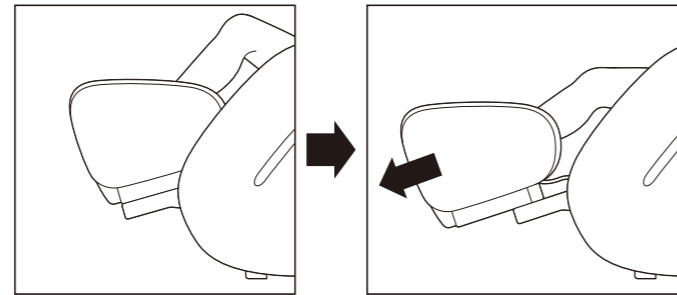

肩位置の設定

- 1.深く腰かけ、頭を背もたれにつけて、ゆったりもたれてください。
- 2.もみ玉(背面)が首をマッサージできるようにヘッドレストの位置を調節してください。
- 3.各マッサージを行う前に「肩位置」ボタンを押して、もみ玉(背面)の位置を5段階から選んでください。

ご使用ごとに肩位置の設定が必要です。

背の高い人は肩位置を1に、背の低い人は肩位置を5に設定してください。また、特に背の低い人はクッションなどで高さを調節してください。

- 自動をお選びの場合は、肩位置検出センサーが自動で肩位置を検出します。

「自動」ボタンを押すと肩位置の検出を開始します。

肩位置検出中はランプが点滅して、肩位置が決定されると点灯にかわります。


肩位置を変更する際は「肩位置」ボタンを押せば手動で高さを調節することができます。

- もみ玉(背面)が適切な位置に当たらないときは、身体をずらして調節してください。

肩位置設定後、もみ玉(背面)がもみ動作を行います。設定後、肩位置がずれている場合は手動で設定してください。その際、もみ玉(背面)で頭や首を挟まないように注意してください。



肩位置	高 ← → 低
リモコンの表示	1 2 3 4 5

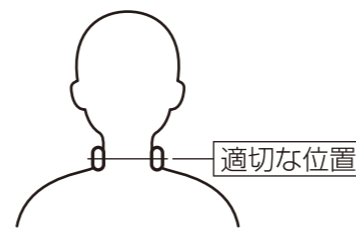


マッサージをはじめ

自動コースでマッサージ

施療部位を効果的にマッサージするようあらかじめ設定された7種類の自動コースからお選びいただけます。

「自動」ボタンを押すごとに自動コースが切り替わります。

- 全身弱**
 - もみ玉(背面)が背中全体をゆったりとした速度で自動でマッサージします。
 - お好みで動作する部位マッサージ(肩エアー・腕エアー・腰+座・脚|足裏)とヒーターを選択できます。
- 全身強**
 - もみ玉(背面)が背中全体を自動でマッサージします。
 - お好みで動作する部位マッサージ(肩エアー・腕エアー・腰+座・脚|足裏)とヒーターを選択できます。
- 肩**
 - もみ玉(背面)が肩を中心に自動でマッサージします。
 - お好みで動作する部位マッサージ(肩エアー・腕エアー・腰+座・脚|足裏)とヒーターを選択できます。
- 腰**
 - もみ玉(背面)が腰を中心に自動でマッサージします。
 - お好みで動作する部位マッサージ(肩エアー・腕エアー・腰+座・脚|足裏)とヒーターを選択できます。
- 背すじ**
 - もみ玉(背面)が背すじを中心に自動でマッサージします。
 - お好みで動作する部位マッサージ(肩エアー・腕エアー・腰+座・脚|足裏)とヒーターを選択できます。
- 下半身**
 - 部位の「腰+座」ボタン「脚|足裏」ボタンが点灯し、腰エアー+バッグ+もみ玉(座面)、脚もみボード+足裏ローラーが動作して下半身を中心に自動でマッサージします。
 - 「脚|足裏」ボタンで足裏ローラーの[入][切]を選択できます。
 - お好みでヒーターを追加できます。
- 脚**
 - 部位の「脚|足裏」ボタンが点灯し、脚もみボード+足裏ローラーが動作して脚を自動でマッサージします。
 - 「脚|足裏」ボタンで足裏ローラーの[入][切]を選択できます。
 - お好みでヒーターを追加できます。

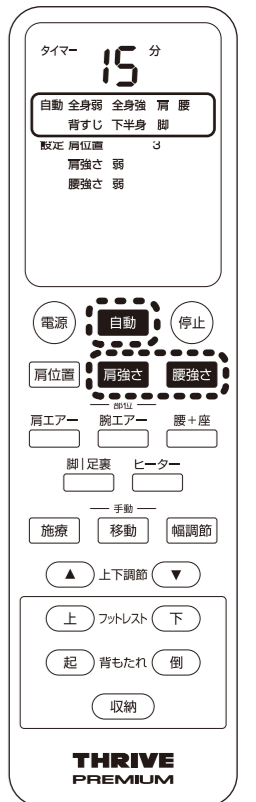

体格や体調に応じてお好みで「肩強さ」「腰強さ」を設定してください。

ボタンを押すごとに[弱][中][強]の順番に切り替わります。

はじめは[弱]から使用してください。

マッサージを急いで中止したいときに「停止」ボタンを押すと、全ての動作が停止します。

- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- 刺激が強すぎるときはタオルなどをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。強い刺激のまま使用を続けるとけがの原因になります。

手動でマッサージ(背面)

お好みでマッサージをしたいときは、

施療 ボタン、**移動** ボタンを押して、

より細かいマッサージが可能です。

施療 ボタン、もしくは**移動** ボタンの単独選択、

施療 + **移動** ボタンの複合選択が可能です。

施療

- 背もたれのもみ玉(背面)が動作し、ボタンを押すごとに [もみ] [たたき] [もみたたき] [停止] の順番に切り替わります。
- お好みで動作する部位マッサージ(肩エア―・腕エア―・腰+座・脚|足裏)とヒーターを選択できます。
- [たたき] [もみたたき] 使用中は、部位マッサージ**肩エア―**ボタンの操作はできません。

移動

- 背もたれのもみ玉(背面)が背すじを移動し、ボタンを押すごとに [全体] [部分] [停止] の順番に切り替わります。
- お好みで動作する部位マッサージ(肩エア―・腕エア―・腰+座・脚|足裏)とヒーターを選択できます。

幅調節

単独選択

- **施療** ボタン…… [たたき]
- **移動** ボタン…… [全体] [部分]

複合選択

- **施療** ボタン…… [たたき] + **移動** ボタン…… [全体]
- **施療** ボタン…… [たたき] + **移動** ボタン…… [部分]
- の選択時は**幅調節** ボタンで、もみ玉(背面)の左右の幅を無段階に調節することができます。
- ボタンを押している間は、もみ玉(背面)の左右の幅が変化します。

上下調節

- 単独選択、複合選択時に上下調節 **▲** **▼** ボタンを押してもみ玉(背面)の高さを調節可能です。
- **▲** ボタンを押している間もみ玉(背面)が移動し、設定している肩位置付近まで上がると止まります。
- **▼** ボタンを押している間もみ玉(背面)が移動し、下限まで下がると止まります。
- **移動** ボタンの [全体] 使用中は **▲** **▼** ボタンの操作はできません。


体格や体調に応じてお好みで **肩強さ** **腰強さ** を設定してください。

ボタンを押すごとに [弱] [中] [強] の順番に切り替わります。

はじめは [弱] から使用してください。

マッサージを急いで中止したいときに **停止** ボタンを押すと、全ての動作が停止します。

- はじめはマッサージの動きを確認してから、弱い刺激を短い時間で使用してください。
- 刺激が強すぎる場合はタオルなどをあてがい、もみ玉の感触を調節してください。強い刺激のまま使用を続けるとけがの原因になります。

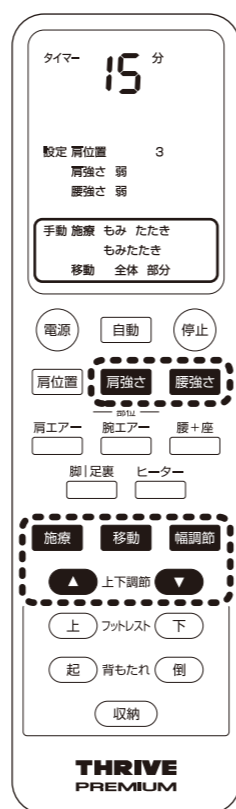

マッサージの種類と調節(手動でマッサージ(背面)の場合)

	動作	幅調節	上下調節
単独選択 施療	[もみ]	—	○
	[たたき]	○	○
	[もみたたき]	—	○
単独選択 移動	[全体]	○	—
	[部分]	○	○
複合選択 施療 + 移動	[もみ]+[全体]	—	—
	[もみ]+[部分]	—	○
	[たたき]+[全体]	○	—
	[たたき]+[部分]	○	○
	[もみたたき]+[全体]	—	—
	[もみたたき]+[部分]	—	○

部位(肩・腕・腰・脚)マッサージ

肩、腕のエア―バッグ、腰+座のエア―バッグともみ玉(座面)、脚|足裏のもみボードと足裏ローラーを単独動作(ひとつの動作)、複合動作(ふたつ以上の動作)に切り替えながらお好みのマッサージを行えます。

肩エア―

- エア―バッグが肩のマッサージを行います。
- 手動マッサージ(背面)の **施療** ボタン…… [たたき] [もみたたき] 使用中は、**肩エア―** ボタンの操作はできません。

腕エア―

エア―バッグが腕のマッサージを行います。

腰+座

エア―バッグともみ玉(座面)で腰、おしり、太ももまわりのマッサージを行います。

脚|足裏


- もみボードがふくらはぎと、足裏ローラーが足裏のマッサージを行います。
- **脚|足裏** ボタンで足裏ローラーの [入] [切] の切り替えが可能です。

注意

- 施療部位にアクセサリなどの硬いものをつけて使用しない。機構部に接触してけがの原因になります。
- 座らない状態でエア―バッグを動作させない。エア―バッグの耐久性が低下する原因になります。

ヒーター

- **ヒーター** ボタンで足裏の布カバーを温めます。ボタンを押すごとに [入] [切] が切り替わります。
- **脚|足裏** と複合動作中の場合は、オートタイマーに準じて約15分間動作します。
- **脚|足裏** 以外のボタンで複合動作した場合、もしくは **ヒーター** ボタンで単独動作した場合は約5分で自動停止します。
- **脚|足裏** と複合動作中に **脚|足裏** ボタンを [切] にしてもみボードを停止した場合はすぐに停止します。
- 停止の際は約10秒間の冷却動作を行い、冷却中はボタンが点滅します。

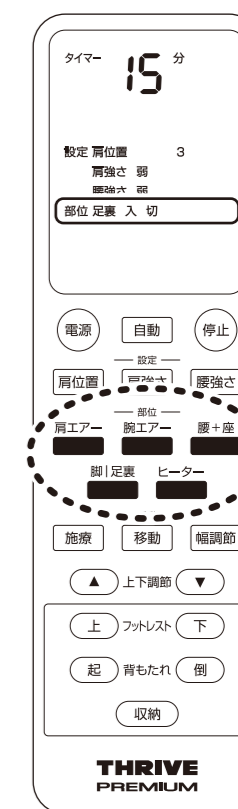

オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れを防止するため、マッサージ開始から約15分を経過すると自動でマッサージを終了します。

節電のため、マッサージ終了後、リモコン操作を行わず約4分間を経過すると、リモコンの動作表示部が自動で消灯します。

再び使用する場合は(電源)ボタンを押してください。

停電時のご注意

使用中に停電になりもみボードが閉じた状態で停止した場合は、フットレストを両手で押さえて片脚ずつ抜き出してください。

また、停電復帰時の事故やけがを防止するため、電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。




使い終わったら

1. 背もたれが倒れ、フットレストが上がった状態の場合は、背もたれ(起)ボタン、フットレスト(下)ボタンを押すか、(収納)ボタンを押し続け、背もたれを起こし、フットレストを下げてください。
2. (電源)ボタンを押してください。
リモコンの動作表示部の「収納中」ランプが点滅し、もみ玉(背面)が最上部、もみ玉(座面)が最前部まで移動し、動作が停止し、動作表示部が消灯します。
(収納)ボタンで背もたれを起こし、フットレストを下げた場合、「収納中」ランプが点滅し、もみ玉(背面)が最上部、もみ玉(座面)が最前部に移動して、動作が停止し、動作表示部が消灯します。
3. 背もたれ背面の電源スイッチを「OFF」にしてください。
4. 電源プラグをコンセントから抜いてください。



注意

フットレストが上がった状態で椅子の乗り降りをしてください。転倒による事故やけが、故障の原因になります。

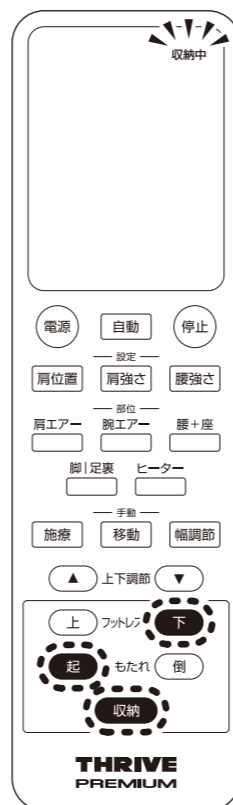

使用上のご注意

合成皮革が変色や変質する原因になります。

長くお使いいただくために次の使用にご注意ください。

- 風呂あがりなど、身体が汗ばんだ状態で使用しないでください。
- 整髪料や化粧品などを付着させないでください。
- ビニールや室内の壁紙などに長時間接触させないでください。

お手入れについて

本体

- 柔らかい乾いた布でふき取ってください。
- 汚れがひどい場合は、ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき、仕上げに乾いた布で水分をふき取ってください。

布部分

- ぬるま湯にうすめた中性洗剤を含ませた布をよくしぼってからふき取ってください。
- 仕上げに水を含ませ、よくしぼった布でふき取ってください。

リモコン

- 柔らかい乾いた布でふき取ってください。



注意

お手入れの際はシンナー、ベンジン、アルコール、熱湯、アイロンやドライヤーは使用しない。変色・変形の原因になります。

保管について

- 電源プラグをコンセントから抜き、アース線を取りはずしてください。
- 汚れやホコリを取り、湿気が少なく直射日光があたらない場所に保管してください。
- 電源コードはねじれをほどこいて保管してください。

故障かなと思ったら

点検、修理を依頼される前に下記のご確認をお願いします。

症 状	調べるところ
<ul style="list-style-type: none"> ●もみ玉と布がすれる音 ●張地とその他がすれる音 ●マッサージ動作時のモーター音 ●エアーマッサージ中の加圧および減圧の音 ●背もたれボタン、フットレストボタン、上下調節ボタンの使用時のタイムラグが大きい 	<ul style="list-style-type: none"> ●構造上のもので機能などに影響はありません
<ul style="list-style-type: none"> ●もみ玉が止まる 	<ul style="list-style-type: none"> ●無理な力がかかっていますか 下記「安全装置について」を参照
<ul style="list-style-type: none"> ●エアバッグが加圧をしない、または弱い 	<ul style="list-style-type: none"> ●エアチューブプラグ、コネクタが完全に接続されていますか
<ul style="list-style-type: none"> ●動作しない、動作が止まる 	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコンの動作表示部はついてますか ●電源プラグが抜けていませんか ●電源スイッチが切れていませんか ●オートタイマーが働き停止状態になっていませんか

症 状	直し方
<ul style="list-style-type: none"> ●動作せずリモコンのランプが点滅する 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグを差し直してください (外来雑音による、誤動作が考えられます)
<ul style="list-style-type: none"> ●連続使用時にマッサージが止まる (リモコンランプは点灯している) 	<ul style="list-style-type: none"> ●モーターの温度上昇のため、安全装置が働いています しばらく本体を休ませて(1時間程度)から再度動作を確認してください



機器に異常音や動作しないなどの異常や故障が発見された場合は、ただちに使用を中止してください。電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理を依頼してください。

安全装置について

もみ玉に無理な力がかかると安全装置が働き動作が止まることがあります。そのときは一度電源を切り、少し置いてから再度電源スイッチを入れてください。特に体重100kg以上の方は身体を浮かせ気味にしてお使いください。

愛情点検について

しばらく使用しなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。

<p>愛情点検</p>	<p>このような症状はありませんか。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● こげくさいにおいがする ● 電源コード、プラグが異常に熱い ● コードを動かすと通電したり、しなかったりする ● その他異常がある 		<p>故障や事故防止のため使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げ販売店またはお客様ご相談センターに点検、修理をご相談ください。</p>
-------------	---	--	---

仕 様

販売名	マッサージチェア CT-100
医療機器認証番号	302AKBZX00031A01
医療機器の種類	管理医療機器
一般的名称	家庭用電気マッサージ器
定格	AC100V 50/60Hz 130W(電熱装置40W含む)
定格時間	20分
オートタイマー	約15分
肩位置調節	5段階
もみ玉幅調節	無段階
もみ回数(背面)	約22回/分
たたき回数(背面)	約230回/分
背すじ全体速さ(往復)	約95秒
背すじ全体移動距離(最長)	約70cm
背すじ部分移動距離	約7cm
もみ回数(座面)	約12回/分
もみ回数(脚)	約12回/分
足裏ローラー自転回数	約12回/分
エアーマッサージ空気圧	80kPa以下
背もたれ角度	約114°~約145°
外形寸法	背もたれ/フットレスト 収納状態 幅 約76cm×奥行 約131cm×高さ 約104cm 背もたれ/フットレスト 出た状態 幅 約76cm×奥行 約161cm×高さ 約86cm
質量	約53kg
電源コード長さ	約2m
張地	合成皮革、ポリエステル
付属品	ヘッドレスト、座クッション、ひじ掛けパネル
製造販売元	大東電機工業株式会社 〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38
医療機器製造販売業許可番号	27B2X00055

アフターサービスについて

- 保証書(裏表紙)
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- 補修用性能部品の最低保有期間
当社は補修用性能部品の製造打ち切り後最低6年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます。)
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- その他ご不明な場合
修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げ販売店またはお客様ご相談センターにお問い合わせください。

地球の環境保護のため、廃棄するときそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

お客様ご相談センターのご案内

商品の返品・返金などについては、お買い上げ販売店にお問い合わせください。

商品のお取り扱い方法、修理などのご相談は

フリーダイヤル  **0120-064-762**

※お客様がご加入されている電話（NTT以外の一般回線、IP電話など）によっては、ご利用できない場合がございます。

上記番号がご利用できない場合は下記番号にお問い合わせください。

TEL 086-722-3482

FAX 086-722-5055

岡山大東電機工業株式会社

〒709-3104 岡山県岡山市北区建部町角石谷 1503-1

【受付時間(祝日を除く月～金)9:00～17:00】

都合によりお休みさせていただくことがあります。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。なお、お客様の個人情報は弊社で責任をもって管理し、第三者への開示や他の目的には使用いたしません。

〈無料修理規定〉

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店または、P17のお客様ご相談センターが無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、商品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店または、P17のお客様ご相談センターに依頼してください。
3. ご転居の場合には事前にお買い上げ販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼になれない場合には、P17のお客様ご相談センターへご相談ください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外(業務用など)に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 本書の提示がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
 - (ト) 指定外電源(電圧・周波数)使用による損傷
6. 本書は国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

- ※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げ販売店または、P17のお客様ご相談センターにお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはP16をご覧ください。

THRIVE

スライヴ

保証書

出張修理

マッサージチェア CT-100

お買い上げ日	保証期間
年 月 日	お買い上げ日より1年間

お客様	
フリガナ	
お名前	様
住所 〒	
電話番号	

販売店	
-----	--

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

本書は再発行しませんので、大切に保管してください。

通信販売などで購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。

販売店欄に記入のない場合は、お買い上げ販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

P18の無料修理規定をご覧ください。

製造販売元

大東電機工業株式会社

〒577-0026 大阪府東大阪市新家東町2-38